




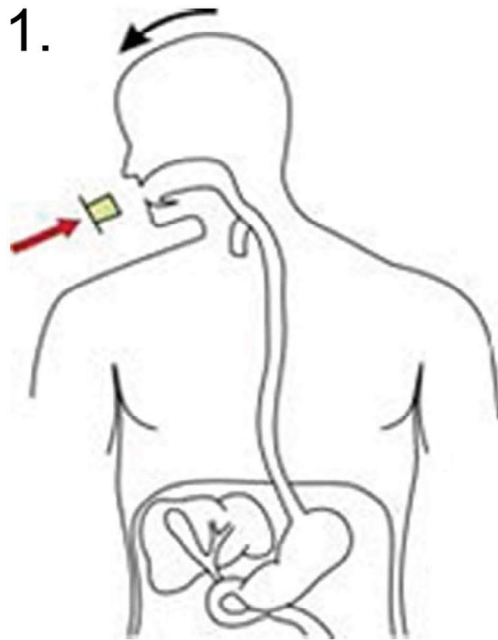


Plaats een bijtblok in de mond van de patiënt.
Plaats eventueel een voedraad tot in de maag.

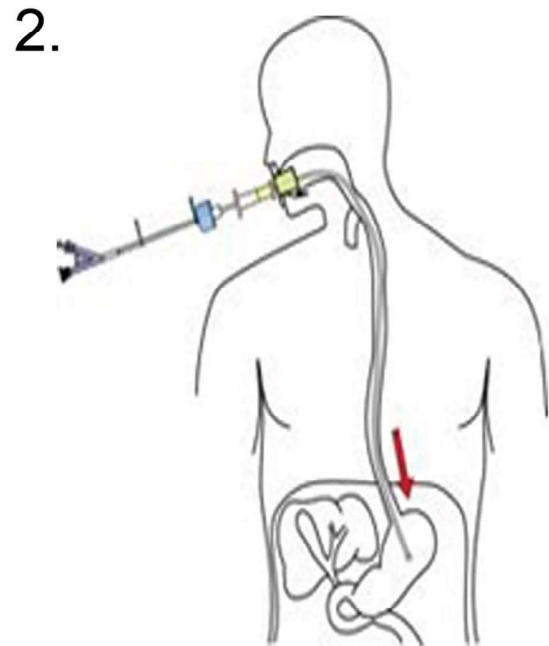




Breng het Danis stent introductie systeem in tot in de maag (ca. 50 cm).

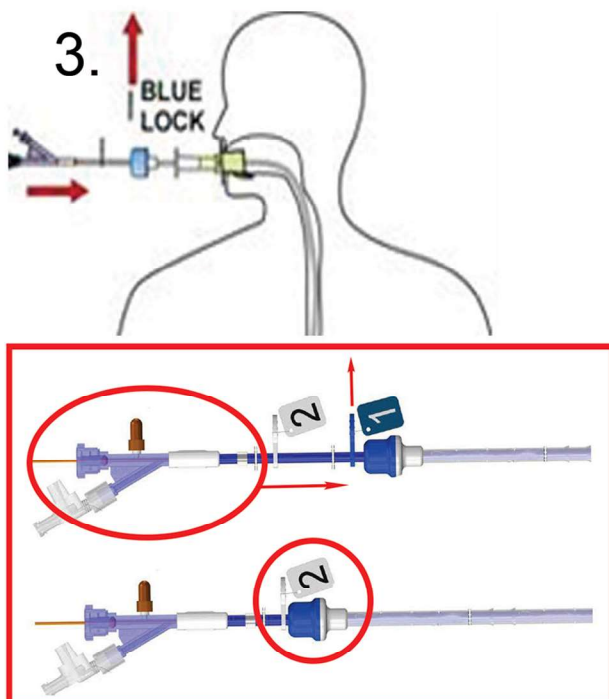

Verwijder het blauwe slotje (1) en duw de binnensheet naar voren tot het witte slotje (2) tegen de blauwe knop aan komt.

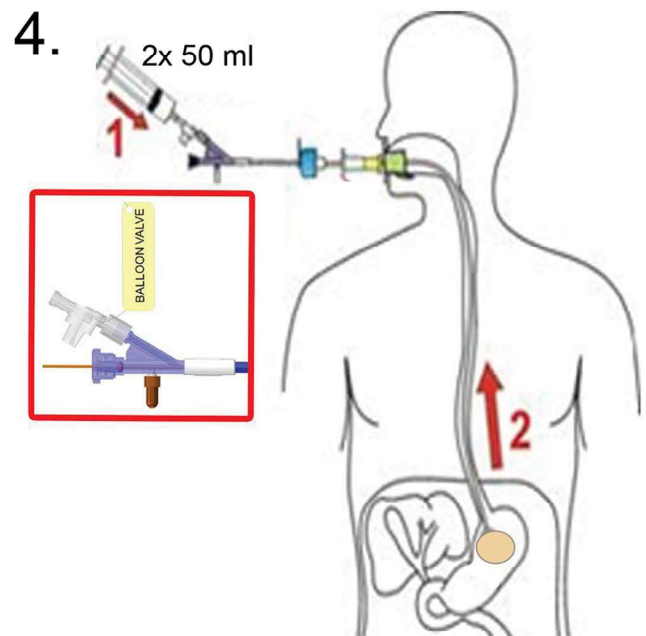


Blaas door de ballonklep 2 x 50 cc lucht in de ballon, zonder de spuit te verwijderen. Trek daarna het hele inbrengsysteem terug tot er weerstand gevoeld wordt.

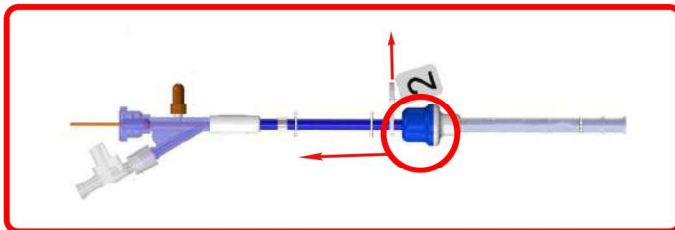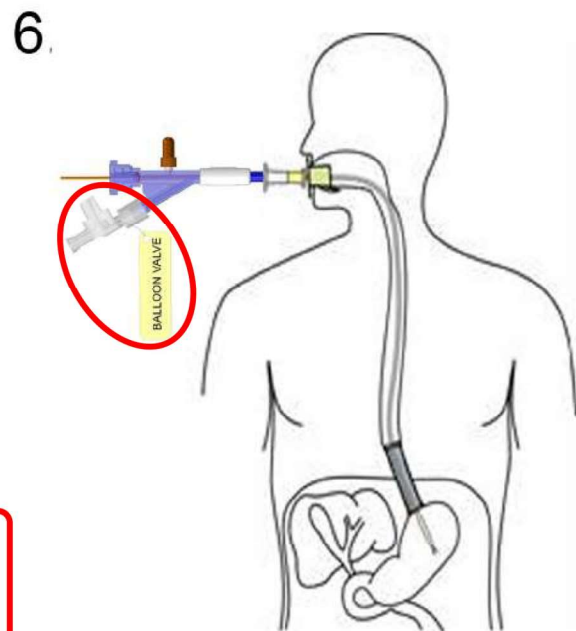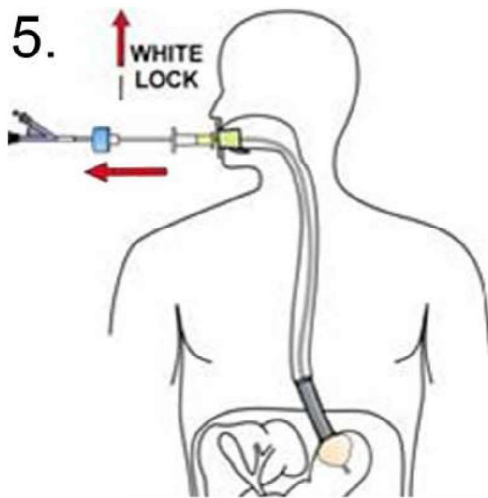

Verwijder de ballonklep van het inbrengsysteem om de ballon in de maag leeg te laten lopen.

Hou tractie op het inbrengsysteem. Verwijder het witte slotje (2). Trek de sheet helemaal naar achteren tot aan de witte hub. De stent is nu ontplooid.

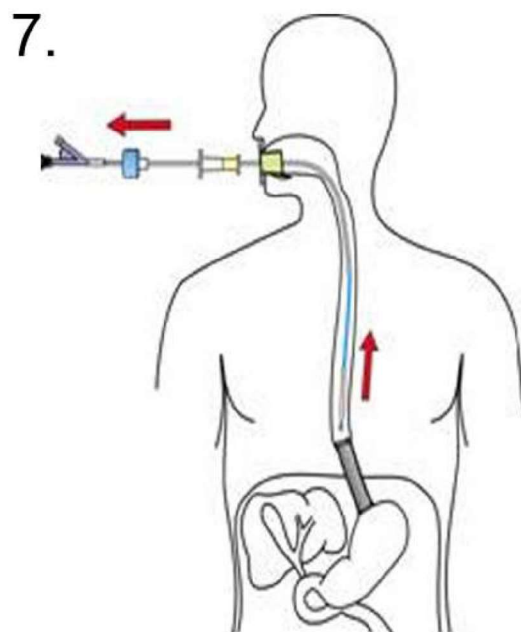

Verwijder voorzichtig het inbrengsysteem.



Scan bovenstaande QR code om direct naar de instructie video te gaan.

Deze video is ook te vinden op:
<https://www.youtube.com/watch?v=1rbYext0cvg>
 vanaf ca. 1:40 minuten.