


1.

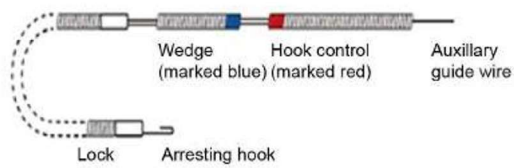

Functies van verschillende onderdelen van de extractie kabel




De haak is ontgrendeld.




De haak is vergrendeld.

2.

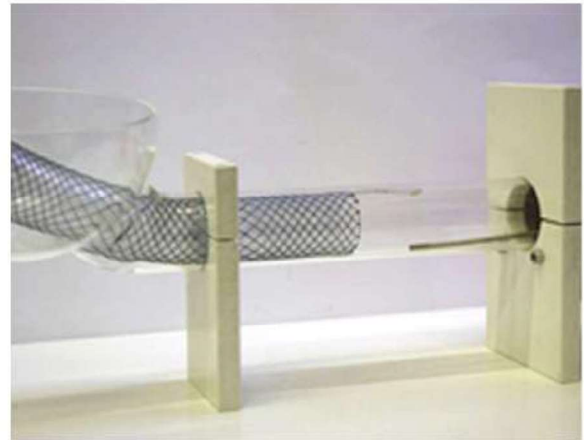


Breng door de scoop de extractie kabel tot vlak voor de stent

3.

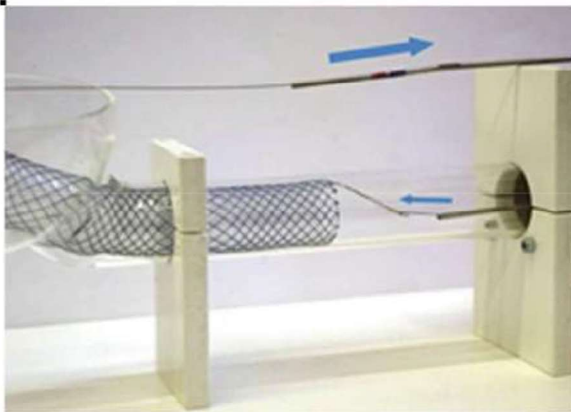


Ontgrendel de haak door de blauwe marker naar de rode marker te duwen. Schuif de haak uit door de rode en de blauwe marker samen naar voren te duwen (zie ook afbeelding 1)
Vang de draad van de stent met de haak


4.

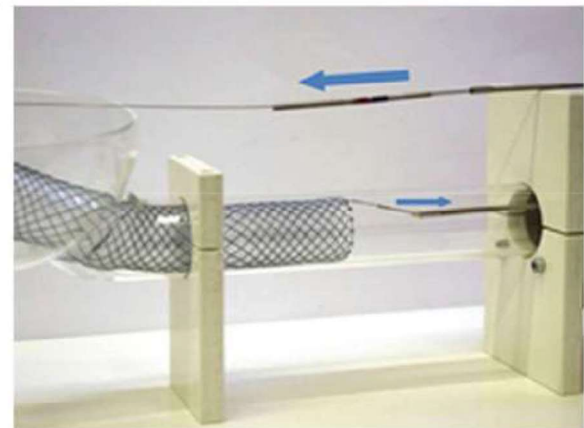


Trek de haak weer in door de rode en de blauwe marker samen weer terug te trekken zodat de haak met stentdraad in de extractor kabel wordt getrokken. (zie ook afbeelding 1)

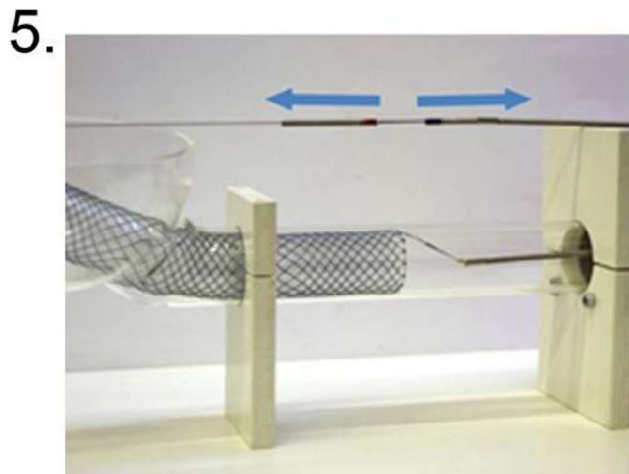


Duw de blauwe marker weer van de rode marker vandaan zodat de haak in de extractor kabel wordt vergrendeld (zie ook afbeelding 1)

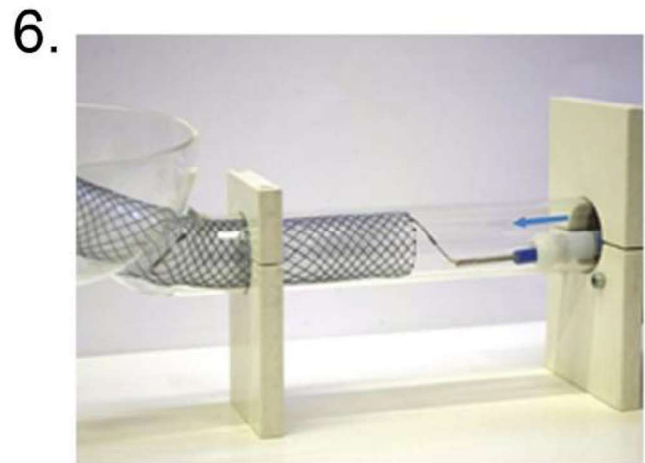


Verwijder de scoop. Voer de sheeth over de extractor kabel op zodat de stent voor de sheeth komt te liggen.

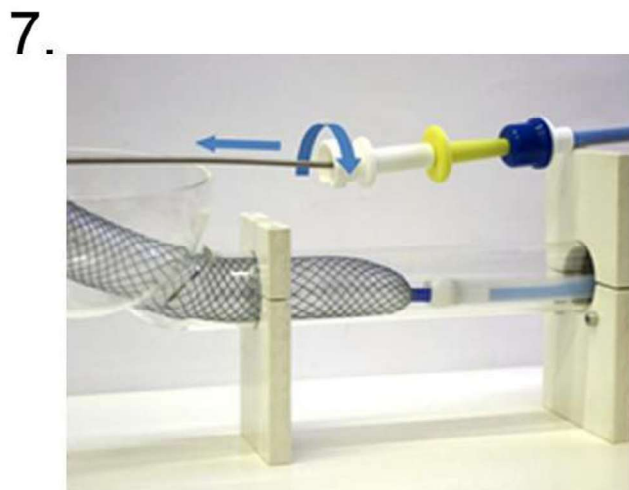

Trek de extractor kabel in de sheeth tot u weerstand voelt. Hiermee wordt het proximale deel van de stent getaperd. Zet de extractor kabel vast in de sheeth door de witte draaiknop vast te draaien,

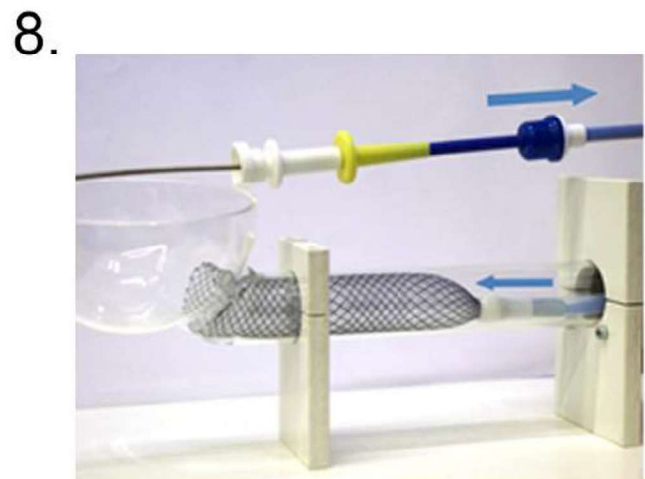

Voer de buitensheeth op terwijl u de blauwe binnensheeth gefixeerd houdt zodat de stent in het systeem komt.

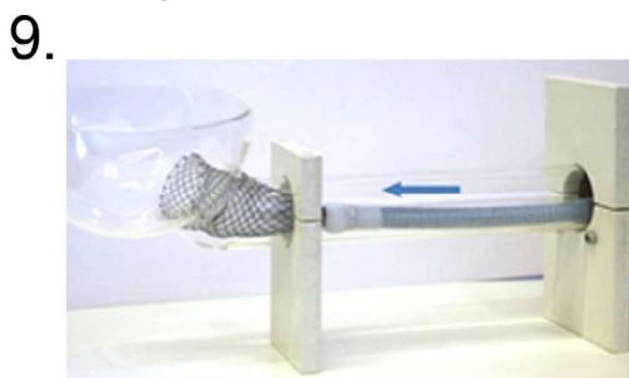

Voer de buitensheeth verder op over de stent terwijl u de binnensheeth gefixeerd houdt. Schuif de sheet op tot de stent zich volledig in sheet bevindt. Trek het gehele systeem rustig terug .

Scan de QR code hiernaast om naar de 3D animatie te gaan

